

Kit Collect

MODE D'EMPLOI

Préparation


1- Ouvrir le vagin artificiel



2- Positionner le liner au centre du vagin



3- Fermer l'ensemble

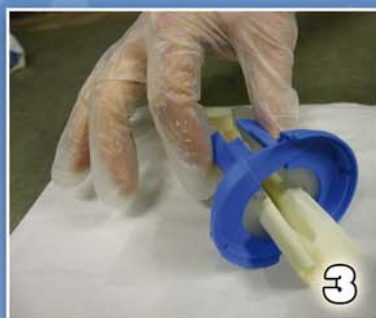

4- Replier le liner autour du dispositif afin de bien l'étendre



5- Pré-engager la languette de fermeture dans l'attache mais sans fermer complètement l'ensemble



Votre Kit est alors prêt à l'emploi.



GENES DIFFUSION
Nous innovons, vous progressez.

Kit Collect

MODE D'EMPLOI


Utilisation

- 6- Préparer le verrat, vider et stimuler le prépuce
- 7- Extérioriser en fournissant une pression ferme et continue avec la main
- 8- Introduire la verge dans le vagin et appliquer une pression en appuyant sur le vagin
- 9- Laisser couler les premiers jets
- 10- Fixer le cône de collecte sur le vagin
- 11- Mettre en place le vagin dans le système de serrage
- 12- Laisser le verrat au travail
- 13- Une fois le travail du verrat terminé, enlever le vagin du système de serrage et retirer le cône de collecte
- 14- Déchirer le sachet de collecte et jeter le cône de collecte et le liner



Nettoyage

- 15- Trempage dans de l'eau savonnée
- 16- Rinçage
- 17- Egouttage sur papier absorbant
- 18- Etuvage (minimum 3h à 65°)

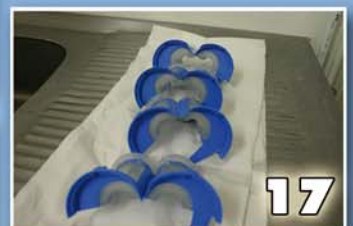

GENES DIFFUSION
Nous innovons, vous progressez.